



CLEANART®

PASTA PROFILÁCTICA



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Pasta Profiláctica está formada por granos pequeños, los cuales permiten al dentista obtener un pulido profesional de los dientes. Su acción mecánica produce una superficie lisa sin erosionar el esmalte dental; la acción mecánica permite pulir el esmalte y eliminar el sarro. Además, es suficientemente abrasiva para remover de modo eficiente todos los residuos de la superficie dentaria sin provocar abrasión indebida del esmalte, dentina o cemento.

Pasta homogénea de color rosado, con sabor dulce y olor similar a tutti-frutti. El aroma y el sabor son un factor muy importante en la pasta profiláctica para no dejar una sensación desagradable en la boca del paciente.

Al tacto deja una sensación arenosa.

2. COMPOSICIÓN

Piedra Pómez

Excipientes c.s.p.

3. INDICACIONES

La pasta profiláctica es indicada para limpieza profiláctica en la remoción de manchas externas, placas, materia alba y residuos orales.

4. INSTRUCCIONES DE USO

Aplique una pequeña cantidad de la pasta con la copa de goma en la superficie de los dientes, utilizando baja rotación hasta la completa remoción de las manchas y placas.

Enseguida enjuague.

5. ADVERTENCIAS

- Durante el procedimiento es necesario tener cuidado con la abrasión excesiva de cualquier material restaurador presente, ya que estos son susceptibles al desgaste debido a su baja dureza.
- Aplicar con cuidado en las áreas con dentina expuesta.
- El uso diario del producto puede causar el desgaste del esmalte.
- Evitar el contacto con mucosas.
- Evite el contacto con los ojos y la piel.

6. PRECAUCIONES

- Producto de uso exclusivo del cirujano-dentista.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- No utilizar el producto vencido.
- En caso de ingestión, busque ayuda médica.
- No utilizar si el envase está dañado.
- El producto es para uso dental y debe ser manipulado de acuerdo con las instrucciones.

7. CONTRAINDICACIONES

No debe utilizarse en pacientes que tengan antecedentes de reacción alérgica grave a cualquiera de los componentes del producto.

En caso de alergias, consultar al especialista.

8. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar siempre el producto en su embalaje original cerrado.
- Mantener en un lugar fresco y seco.
- Mantener alejado de la luz solar.
- Almacenar a temperaturas menores de 30 °C.

9. TIEMPO DE VIDA ÚTIL

El tiempo de vida útil del producto es de 3 años.

10. PRESENTACIÓN

PASTA PROFILÁCTICA 50 g	Caja de cartón foldcote con (01) tubo colapsible ABL blanco + sello de seguridad + (01) tapa flip top blanca de polipropileno conteniendo 50 g de Pasta Profiláctica.
PASTA PROFILÁCTICA 90 g	Caja de cartón foldcote con (01) tubo colapsible ABL blanco + sello de seguridad + (01) tapa flip top blanca de polipropileno conteniendo 90 g de Pasta Profiláctica.
PASTA PROFILÁCTICA 100 g	Caja de cartón foldcote con (01) tubo colapsible ABL blanco + sello de seguridad + (01) tapa flip top blanca de polipropileno conteniendo 100 g de Pasta Profiláctica.

Límite superior de temperatura		Número de lote	LOT
Mantener alejado de la luz solar		Fecha de vencimiento	
Mantener en seco		Consultar instrucciones de uso	
No estéril		Precaución, consultar los documentos adjuntos	
No utilizar si el envase está dañado		Fabricante	
Número de catálogo	REF		

El fabricante no se hace responsable por los daños causados por el uso incorrecto o no previsto en las instrucciones de uso.

11. FECHA DE REVISIÓN

Revisión: 01

Fecha: 2024-11-15

Fabricado por: MEDENFAR LAB S.A.C.
R.U.C. 20604554668
Jr. Pariacoto 698, Breña - Lima - Perú.

Para: MEDENFAR CORP S.A.C.
R.U.C. 20604554641
Jr. Aguarico 391, Breña - Lima - Perú.
R.S. N° DM0791N

