



CALCINART®

HIDRÓXIDO DE CALCIO PASTA



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Calcinart® (Hidróxido de Calcio Pasta) es un dispositivo médico que está compuesto por una jeringa con tapón que contiene pasta de hidróxido de calcio, pasta homogénea de color blanco a blanco cremoso, radiopaca, que no endurece.

El dispositivo médico de Hidróxido de Calcio Pasta en su composición presenta hidróxido de calcio, elemento importante para inducir la formación de la dentina reparadora y utilizado como material intracanal en procedimientos endodónticos.

Este componente también posee excelente biocompatibilidad y estimula el tejido hospedero, favoreciendo la reparación tisular por la activación enzimática tisular, generando efecto mineralizador. Induce la formación de la dentina reparadora, permitiendo un aumento de la capa de dentina preexistente y ofreciendo mejores condiciones de protección a la pulpa cuando está sometida a lesiones.

2. COMPOSICIÓN

Hidróxido de Calcio

Excipientes c.s.p.

3. INDICACIONES

La pasta de hidróxido está indicada para usarse en procedimientos endodónticos:

- Sellado temporal de conductos radiculares.
- Induce el cierre apical en procesos de apexificación o perforación.
- Pulpotomía vital.
- Recubrimiento pulpar directo e indirecto.
- Relleno del conducto radicular para dientes primarios.

4. INSTRUCCIONES DE USO

Utilizar Hidróxido de Calcio Pasta después de la instrumentación y secado del conducto radicular.

1. Insertar Hidróxido de Calcio Pasta en el tercio apical de la longitud del canal.

2. Presione el émbolo hasta que la pasta llegue al “foramen apical” y luego retire lentamente la jeringa hasta que el conducto esté completamente lleno, según corresponda:

- a) Complete el tratamiento con una restauración temporal para sellar el acceso.
- b) Hacer la restauración permanente del acceso.
- c) Insertar Hidróxido de Calcio Pasta en el canal. Cuidar para que la pasta no rebose.

3. Retire el exceso de pasta con un algodón esterilizado.

5. ADVERTENCIAS

- Evite el contacto con la piel, los ojos, la mucosa oral, los tejidos blandos, etc., ya que la pasta de hidróxido de calcio tiene un pH muy alto y puede causar quemaduras. En caso de contacto, enjuague de inmediato con abundante agua y busque atención médica adecuada.
- Si se produce sarpullido y sensibilización u otra reacción alérgica, suspenda el uso y busque atención médica.
- El contacto con la saliva, la sangre y otros fluidos corporales durante la aplicación puede reducir la eficacia de Hidróxido de Calcio Pasta.

6. PRECAUCIONES

- Producto de uso exclusivo del cirujano-dentista.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- No utilizar el producto vencido.
- En caso de ingestión, busque ayuda médica.
- No utilizar si el envase está dañado.
- El producto es para uso dental y debe ser manipulado de acuerdo con las instrucciones.

7. CONTRAINDICACIONES

No debe utilizarse en pacientes que tengan antecedentes de reacción alérgica grave a cualquiera de los componentes del producto. En caso de alergias, consultar al especialista.

8. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar siempre el producto en su embalaje original cerrado.
- Después de cada uso, cerrar el tapón de jeringa con cuidado.
- Mantener en un lugar fresco y seco.
- Mantener alejado de la luz solar.
- Almacenar a temperaturas menores de 30 °C.

9. TIEMPO DE VIDA ÚTIL

El tiempo de vida útil del producto es de 3 años.

10. PRESENTACIÓN

HIDRÓXIDO DE CALCIO PASTA 2 g	Caja de cartón foldcote con una (01) Jeringa de polipropileno conteniendo 2 g de hidróxido de calcio pasta + (02) puntas de aplicación en bolsa de polietileno.
HIDRÓXIDO DE CALCIO PASTA 3 g	Caja de cartón foldcote con una (01) Jeringa de polipropileno conteniendo 3 g de hidróxido de calcio pasta + (02) puntas de aplicación en bolsa de polietileno.

Límite superior de temperatura		Número de lote	
Mantener alejado de la luz solar		Fecha de vencimiento	
Mantener en seco		Consultar instrucciones de uso	
No estéril		Precaución. consultar los documentos adjuntos	
No utilizar si el envase está dañado		Fabricante	
Número de catálogo			

El fabricante no se hace responsable por los daños causados por el uso incorrecto o no previsto en las instrucciones de uso.

11. FECHA DE REVISIÓN

Revisión: 01
Fecha: 2025-03-07

Fabricado por: MEDENFAR LAB S.A.C.
R.U.C. 20604554668
Jr. Parlacoto 698, Breña - Lima - Perú.

Para: MEDENFAR CORP S.A.C.
R.U.C. 20604554641
Jr. Aguarico 391, Breña - Lima - Perú.
R.S. N° DM0806N