

EDTA

Solución 17%



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: La solución de EDTA 17 % es una solución quelante, usada durante la instrumentación de los conductos radiculares y como complemento para remover la capa del barrillo dentario. Aumenta el diámetro de la entrada de los tubulos dentinales, dejando las paredes más limpias y facilitando la acción de medicamentos intraconducto.

2. COMPOSICIÓN: Etilato disódico, Excipientes: Hidróxido de Sodio, Agua Purificada.

3. INDICACIONES: •Indicado para facilitar la instrumentación en la endodoncia. •Indicado para la limpieza y modelado del conducto radicular durante la instrumentación. •Indicado para ampliar los canales radiculares y remover la capa de barrillo dentario.

4. INSTRUCCIONES DE USO: 1. Para una remoción efectiva de los componentes orgánicos e inorgánicos del barrillo dentario, el canal debe ser irrigado con 1 ó 2 gotas de EDTA 17 % Solución. 2. Esperar 2-3 minutos para iniciar la instrumentación. 3. Después de 5-6 minutos, el producto disminuye su efecto, el producto reacciona con la dentina y es neutralizado. 4. Riegue el canal de nuevo y repita el proceso según la necesidad. 5. Mantener el canal humedecido con el producto durante todo el procedimiento.

5. ADVERTENCIAS: •El contacto con la piel puede provocar irritaciones, quemaduras e hipersensibilidad. •Si se produce contacto con la piel, límpiela inmediatamente con algodón y alcohol y luego lávela bien agua y jabón. •Si se produce erupción cutánea y sensibilidad u otra reacción alérgica, suspenda su uso y busque atención médica. •Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua y consulte a un médico. •Evite el contacto de la solución más allá del canal dentario de irrigación.

6. PRECAUCIONES: •Producto de uso exclusivamente profesional. •Mantenga fuera del alcance de los niños. •No utilizar el producto con el plazo de validez vencido. •No ingerir, en caso ocurra busque ayuda médica. •No utilizar si el envase está dañado.

7. CONTRAINDICACIONES: No utilizar en pacientes alérgicos a algunos de los componentes. En caso de alergias consultar al especialista.

8. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO : •Después de cada uso mantener bien cerrado el frasco. •Mantener en un lugar fresco y seco. •Mantener alejado de la luz solar. •Almacenar a temperaturas menores de 30°C.

9. TIEMPO DE VIDA ÚTIL: El tiempo de vida útil del producto a temperatura ambiente es de 3 años.

10. PRESENTACIÓN: Caja de cartón foldeote con (01) frasco ámbar de vidrio tipo III conteniendo 15 mL de solución + una tapa blanca de polipropileno con cuentagotas transparente de polietileno de alta densidad.

11. FECHA DE REVISIÓN

Revisión: 02

Fecha: 2024-02-29

Límite superior de temperatura		Número de lote	LOT
Mantener alejado de la luz solar		Fecha de vencimiento	
Mantener en seco		Consultar instrucciones de uso	
No enterr		Precaución, consultar los documentos adjuntos	
No utilizar si el envase está dañado		Fabricante	
Número de catálogo	REF		

El fabricante no se hace responsable por los daños causados por el uso incorrecto o no previsto en las instrucciones de uso

Fabricado por:
MEDENFAR LAB S.A.C.
R.U.C. 20604554668
Jr. Parícuto 698, Breña - Lima - Perú.



Para: MEDENFAR CORP S.A.C.
R.U.C. 20604554641
Jr. Aguarico 391, Breña - Lima - Perú.
R.S. N° DM0715N